

MEDUMAT Easy

Beatmungsgerät mit Sprachführung

MEDUMAT Easy ist extrem einfach und sicher zu handhaben. Trainierte Ersthelfer und First Responder kommen problemlos zurecht und können sich voll und ganz auf den Patienten konzentrieren. Per Sprachanweisung wird der Helfer in seiner Anwendung sicher unterstützt. Der Demand-Flow-Modus bei der Sauerstoffinhalation steuert die Zufuhr des Sauerstoffs und passt den Verbrauch dem Bedarf des Patienten an.



MEDUMAT Easy, WM 28000



MEDUMAT Easy auf dem Tragesystem LIFE-BASE III...



... und im Notfallrucksack RESCUE-PACK I

Anwenderfreundlich

- einfach und sicher zu handhaben
- Klare und deutliche Ansagen führen zu einer sicheren Beatmung.
- sprachunterstützte Bedienung in zahlreichen Sprachen erhältlich
- akustische Alarmer und optische Alarmmeldungen
- Anzeige für Beatmungsdrucküberwachung


Ergonomisch

- klein und leicht
- EN-1789-konforme Wandhalterung und Trageplatten
- auf Weinmann-Trageplatten und in Weinmann-Notfallrucksäcken unterzubringen

Energieversorgung / Sauerstoffverbrauch

- wartungsfreie Lithium-Batterie mit einer Lebensdauer von mindestens zwei Jahren (kein Aufladen erforderlich)
- kein Eigenverbrauch von Sauerstoff
- optimierter Sauerstoffverbrauch durch Demand-Flow-Modus: Der Patient erhält während der Inspiration Sauerstoff; kein Sauerstoffverlust in der Ausatemphase durch Dauerfluss
- Beatmung oder Inhalation
- kontrollierte Beatmung (IPPV) mit nur einem Drehknopf im Griff einstellbar (zeitgesteuert, volumenkonstant)
- PEEP-Ventil anschließbar

Geräte-Bezeichnung und implementierte Sprachen	WM-Nr.
MEDUMAT Easy Beatmungsgerät (DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, SE, DK, NO, FI, IS)	28000
MEDUMAT Easy Beatmungsgerät (RU, PL, CS, ZH, JP, AR, TR, ID, TH, FA, DE, EN)	28020

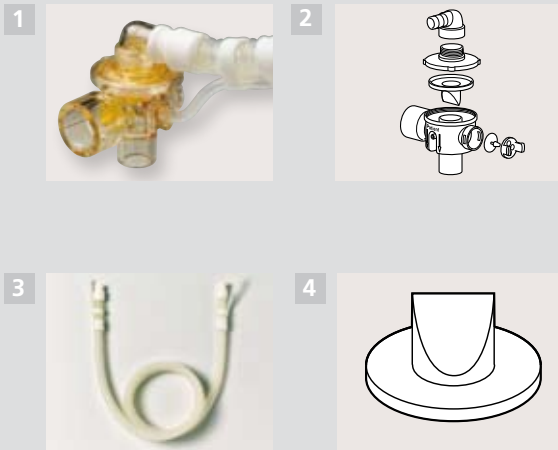

Zubehör

1 Mehrweg-Patientenschlauchsystem – WM 22520
mit Patientenventil mit Beatmungsschlauch

Einweg-Patientenschlauchsystem – WM 28110
(o. Abb.)

mit Patientenventil mit Beatmungsschlauch
10er-Set (WM 15454)
25er-Set (WM 15155)
50er-Set (WM 15456)

2 Patientenventil – WM 3280

bestehend aus:

- Patientenschlauchanschluss (WM 3213)
- Steueroberteil (WM 3181)
- Steuerunterteil mit Spontanatem-
möglichkeit (WM 3285)
- Lippenmembran (WM 3211)

3 Beatmungsschlauch – WM 22647

4 Lippenmembran – WM 3211

25er-Set (WM 15320)
50er-Set (WM 15330)
100er-Set (WM 15340)

Unser vollständiges Angebot an Systemlösungen für Notfall-,
Transport- und Katastrophenmedizin finden Sie unter:
www.weinmann.de

Technische Daten MEDUMAT Easy



Produktklasse nach 93/42/EWG:	II b	Stromversorgung:	Lithiumbatterie: 3,6 V; 5,2 Ah von außen zugänglich, erwartete Lebensdauer > 2 Jahre
Schutzgrad gegen Wasser:	IPX4	IPPV-Beatmung	
Erfüllte Produktnormen:	EN 794-3, EN 60601-1, EN 1789 RTCA/DO-160D	■ Beatmungsfrequenz (Freq.):	synchronisiert einstellbar von 10 bis 30 min ⁻¹
Geräteabmessungen (B x H x T in mm):	100 x 145 x 90 inkl. Anschlüsse	■ Atemminutenvolumen (MV):	synchronisiert einstellbar von 3 bis 16 l/min
Gewicht (in kg):	ca. 0,6	■ Max. Beatmungsdruck:	20 oder 45 mbar ¹⁾
Temperatur		Modus Demandflow	
■ Betrieb:	-18 °C bis +60 °C	■ Trigger:	< 1 mbar ¹⁾
■ Lagerung:	-40 °C bis +70 °C	■ Spitzenflow:	> 40 l/min
		■ Abschaltdruck:	3 mbar ¹⁾

¹⁾ 1 mbar \triangleq 1 hPa

3141.3-01-DE-0808-1 © Urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung jeder Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Weinmann. Alle Angaben aus drucktechnischen Gründen ohne Gewähr.

■ **Deutschland** ■ Weinmann Geräte für Medizin GmbH+Co.KG · Postfach 540268 · 22502 Hamburg · Kronsaalweg 40 · 22525 Hamburg · E: info@weinmann.de · www.weinmann.de · T: 040-5 47 02-0 F: 040-5 47 02-461 ■ Zentrum für Produktion, Logistik, Service · Weinmann Geräte für Medizin GmbH+Co.KG · Siebenstücken 14 · 24558 Henstedt-Ulzburg · T: 04193-88 91-0 · F: 04193-88 91-450
 ■ **Schweiz** ■ G. Weinmann AG – Neuenhof · T: +41-(0)56-416 41 11 · E: info@ch.weinmann.de · www.weinmann.de ■ **Frankreich** ■ Weinmann S.A.R.L. – Paris-Igny · T: +33-(0)1 69 35 53 20 E: info@fr.weinmann.de · www.weinmann.de ■ **Asien-Pazifik** ■ Weinmann Medical Technology Asia Co., Ltd. – Bangkok · T: +66-(0)2-7 45 71 70 · E: info@th.weinmann.de · www.weinmann.de ■ **Australien** ■ Weinmann (Australia) Pty. Ltd. – Melbourne T: +61-(0)3-95 43 91 97 · E: info@au.weinmann.de · www.weinmann.de ■ **Neuseeland** ■ Weinmann (New Zealand) Ltd. – New Plymouth · T: +64-(0)6-7 59 22 10 E: info@nz.weinmann.de · www.weinmann.de ■ **China** ■ Weinmann GmbH+Co.KG · (Shanghai Rep. Office) · T: +86 21 32 26 26 98 · E: info@cn.weinmann.de · www.weinmann.de