



Unser Hygienekonzept

*Patientenwechsel –
durch Hygienebox wirtschaftlich
und sicher*

Hygienebox



Optimaler Schutz für Patienten

Unsere Schlaftherapie- und Heimbeatmungsgeräte können dank unseres einzigartigen patentierten Austauschkonzeptes schnell, sicher und kostengünstig hygienisch aufbereitet und damit von Keimen und Geruch befreit werden.

Beim Patientenwechsel ermöglicht der Austausch bzw. die Aufbereitung der Hygienebox, dass ein Therapiegerät nicht entsorgt werden muss. Nach den Hygiene-richtlinien des Robert-Koch-Instituts gilt das Gerät wieder als hygienisch einwandfrei. Das hilft Kosten zu senken und Ressourcen zu schonen.

Sichere und günstige Aufbereitung

- ▶ kostensenkende und ressourcenschonende Wiederaufbereitung
- ▶ schneller und einfacher Austausch aller luftführenden Teile durch Service-Techniker
- ▶ optimale Desinfektion der Box aus Metall
- ▶ hoher Schutz für Patienten
- ▶ keim- und geruchsfreie Aufbereitung
- ▶ entspricht den Hygiene-Richtlinien des Robert-Koch-Instituts

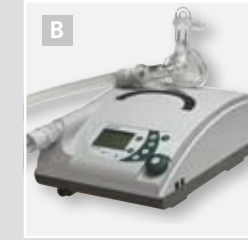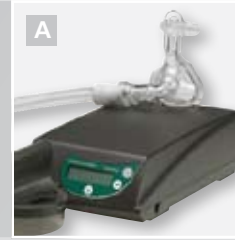

Die Hygienebox kann dem Therapiegerät mit wenigen Handgriffen entnommen werden.

Bei der anschließenden Aufbereitung der Hygienebox werden nur die luftführenden Schaumstoffteile wie Dämpfungseinsätze (2), Labyrinth und Motorrahmen (3) herausgenommen und entsorgt.

Anschließend werden die Box (1) und das Gebläse (4) gereinigt, desinfiziert und neue Schaumstoffteile eingesetzt.

Alternativ können Sie auch eine Austauschbox beziehen (eine von Weinmann bereits hygienisch aufbereitete Box mit neuen Dämpfungseinsätzen).

- A Schlaftherapiegerät (z. B. SOMNOcomfort, SOMNOsmart 2 etc.)
- B Heimbeatmungsgerät, (z. B. VENTImotion, VENTIllogic etc.)
- 1 Hygienebox-Metallgehäuse
- 2 Dämpfungseinsatz
- 3 Labyrinth mit Motorrahmen
- 4 Gebläse (Motor)

Hygienebox im Austausch

Praktischer Schutz für Patienten



Schlaftherapiegerät
(z. B. SOMNO*comfort* 2,
SOMNO*balance* etc.)

Zeitsparender
Austausch der
kompletten Hygienebox



Schlaftherapiegerät
Unterseite, geöffnet



Hygienebox für
Austausch entnommen

Es werden außerdem alle in den
Wartungssets enthaltenen Komponenten
wie Filter, Abdeckkappen, Dichtungen etc.
ausgetauscht.

Weinmann Geräte für Medizin GmbH+Co.KG
Postfach 540268 ■ 22502 Hamburg
Kronsaalweg 40 ■ 22525 Hamburg
E: info@weinmann.de ■ www.weinmann.de
T: 040-5 47 02-0 ■ F: 040-5 47 02-461

Zentrum für Produktion, Logistik, Service
Weinmann Geräte für Medizin GmbH+Co.KG
Siebenstücken 14 ■ 24558 Henstedt-Ulzburg
T: 04193-88 91-0 ■ F: 04193-88 91-450

3050-09-DE-1108-2